



# bioli™人工晶状体推注器

台湾原装进口/型号: BIOLI-C, BIOLI-rC, BIOLI-D

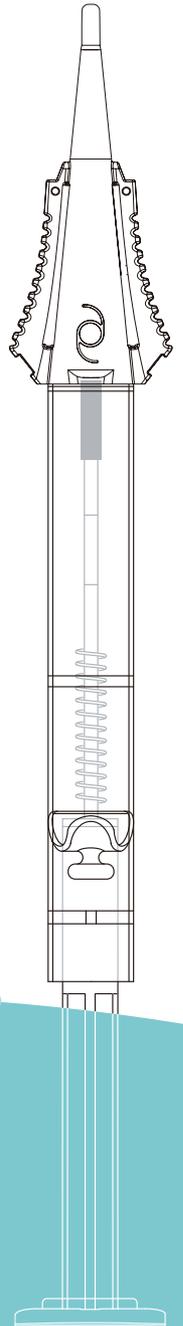

方便人工晶状体快速安装的飞机头设计  
润滑效果极佳的LubriMATRIX™表面处理技术

**符合易用性设计的人工晶状体推注器**

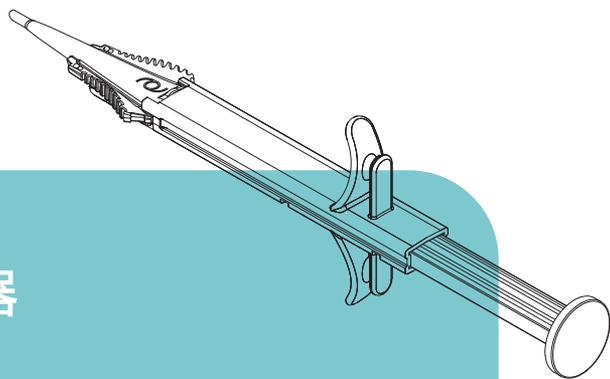

## 操作简单、安全顺滑的推注器

适用于单件式亲水性及疏水性人工晶状体

台湾原装进口的bioli™人工晶状体推注器，是一款以使用者易用性为出发点设计的推注器，液压式推进设计方便手术过程中单手操作，导入头采用飞机头设计搭配美国AST公司专有的LubriMATRIX™表面亲水性润滑处理，不仅使人工晶状体的装载简单又快速，同时让人工晶状体在白内障植入手术中的推送更滑顺又安全。

### bioli™人工晶状体推注器共有3个型号：


型号	BIOLI-C	BIOLI-rC	BIOLI-D
适用于手术切口	2.75mm	2.75mm	2.2mm
导入头管口设计	椭圆形	圆形	椭圆形

导入头推注管口椭圆形的设计可有效降低植入过程造成的伤口撕裂；圆形的设计则可减少推注过程对晶体表面造成的折痕或刮伤，相较而言圆形的设计对人工晶状体的包容性更大，两款设计可满足客户不同的需求。本产品经环氧乙烷灭菌，一盒10套，每套装有一支一次性使用无菌人工晶状体推注器。

### 操作流程



注入眼科粘弹剂

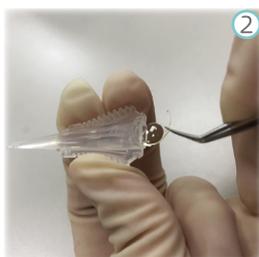

以倒“S”方向装入人工晶状体



导入头组装至推进器上



人工晶状体顺利推出