



# Cart-D™人工晶状体折叠夹

台湾原装进口/型号: CARTRIDGE-D

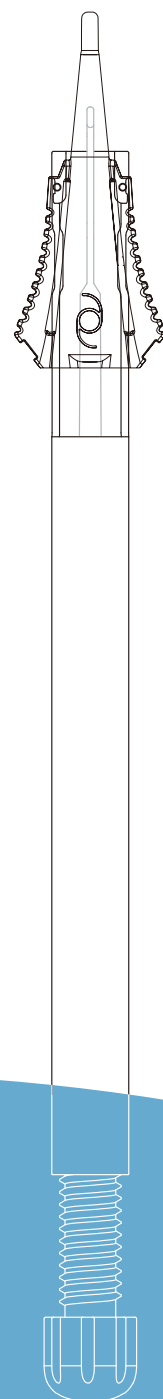

方便人工晶状体快速安装的飞机头设计  
润滑效果极佳的LubriMATRIX™表面处理技术

**符合兼容性设计的人工晶状体折叠夹**

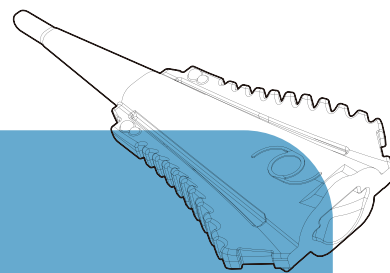


## 一次性使用无菌人工晶状体折叠夹

适用于搭配可重复灭菌使用的金属推注器

台湾原装进口的Cart-D™人工晶状体折叠夹，是一款兼容性极佳的折叠夹，可搭配任何经适配性验证相容、可重复灭菌使用的金属推注器，用于白内障晶体植入术中辅助人工晶体的推注。折叠夹两侧锯齿状的设计增加拿放时的稳定性，整体飞机头机构设计搭配美国AST公司专有的LubriMATRIX™表面亲水性润滑处理，不仅使人工晶状体的装载简单又快速，同时让人工晶状体的推注更滑顺又安全。

### Cart-D™人工晶状体折叠夹

Cart-D™人工晶状体折叠夹(型号：CARTRIDGE-D)，适用于手术切口小至2.2mm的人工晶状体植入，折叠夹推注管口椭圆形的设计可有效降低植入过程造成的伤口撕裂。本产品经环氧乙烷灭菌，一盒10包，每包装有一个一次性使用无菌人工晶状体折叠夹。

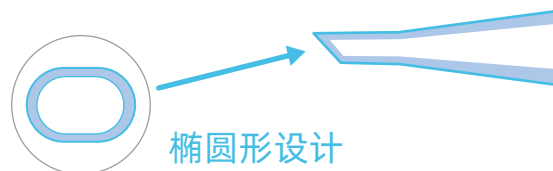

### 操作流程




① 注入眼科粘弹剂



② 以倒“S”方向装入人工晶状体



③ 折叠夹组装至推注器上

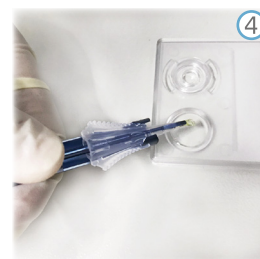

④ 人工晶状体顺利推出